


### DIE VORBEREITUNG


Die Testkassette ist vor der Testdurchführung auf Raumtemperatur zu bringen (18-26°C).

**Bitte beachten:** Ca. 30 Minuten vor der Testung das Konsumieren von Speisen, Getränken, Kaugummi, Tabak und sonstigen Substanzen unterlassen, um eine Verfälschung des Ergebnisses zu vermeiden.

### DIE PROBENENTNAHME

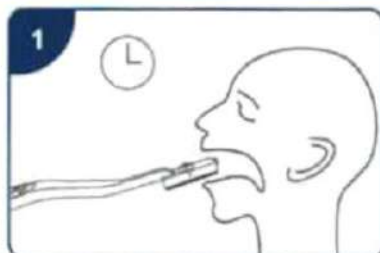


Führen Sie das Schwammende des Speichelsammlers in den Mund ein. Wischen Sie vorsichtig an der Mundinnen-seite und auf der Zunge entlang, um den Speichel zu sammeln (ca. 90 Sekunden). Lassen Sie den Speichel möglichst von selbst in den Schwamm einziehen.

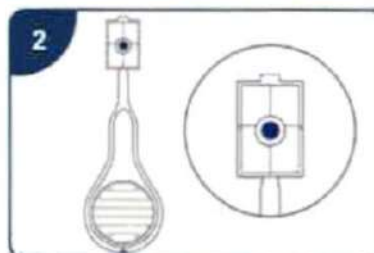

**Bitte beachten:** Der Schwamm darf nicht mit der Zunge ge-drückt oder mit den Zähnen gebissen werden. Nehmen Sie den Speichelsammler aus dem Mund, wenn der Schwamm vollständig durchfeuchtet und weich ist oder der Indikator auf der Rückseite sich blau verfärbt hat.


### DAS TESTVERFAHREN

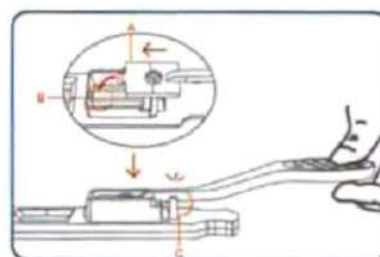

Entfernen Sie die Testkassette aus dem verschweißten Folienbeutel, legen Sie die Testkassette horizontal auf den Tisch und markieren Sie diese entsprechend der Patientendaten. Stecken Sie den Speichelsammler (A) mit der Schwammseite nach unten in die für den Test vorgesehene Halterung (B) der Kassette. Der Höcker am Ende des Speichelsammlers passt genau in das Loch im hinteren Bereich der Halterung. Drücken Sie den Speichelsammler herunter bis er einrastet (C) (Siehe Abbildung). Ein rötlicher Farbverlauf zeigt an, dass die Chromatographie gestartet ist.

Neben dem Testfeld befinden sich zwei Markierungen auf der Testkassette (C + T). Die C-Linie ist eine interne Verfahrenskontrolle und muss immer nach Ende der Ablesezeit eine rote Linie anzeigen. Die T-Linie ist die sogenannte Testlinie, die anzeigt, dass das COVID-19 Antigen in der Probe erkannt wurde.

### DAS TESTVERFAHREN

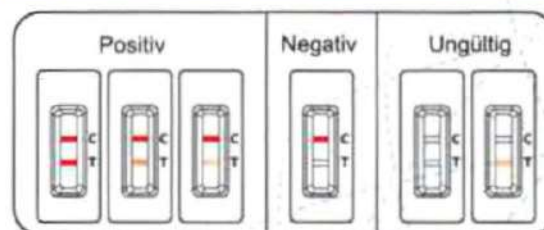

**Lesen Sie die Ergebnisse erst nach 10 Minuten ab.**

**Positiv:** Zwei rote Linien erscheinen. Testung ist gültig und positiv.

**Negativ:** Keine Linie im T-Bereich, eine Linie im C-Bereich. Testung gültig und negativ.

**Ungültig:** Es erscheint keine Linie im Testbereich. Testung ist ungültig und muss wiederholt werden.

#### Anmerkung:

Bei positiven Ergebnissen zeigt jede Abweichung in der Farbintensität der T-Linie ein positives Ergebnis. Positive Ergebnisse müssen grundsätzlich mittels eines PCT-Tests bestätigt werden. Negative Ergebnisse sollten nicht als alleinige Diagnosemethode für den Abschluss einer COVID-19 Infektion genutzt werden.